



トイレリフトEWC151系 現場設置条件チェック表

<A. 空間条件>

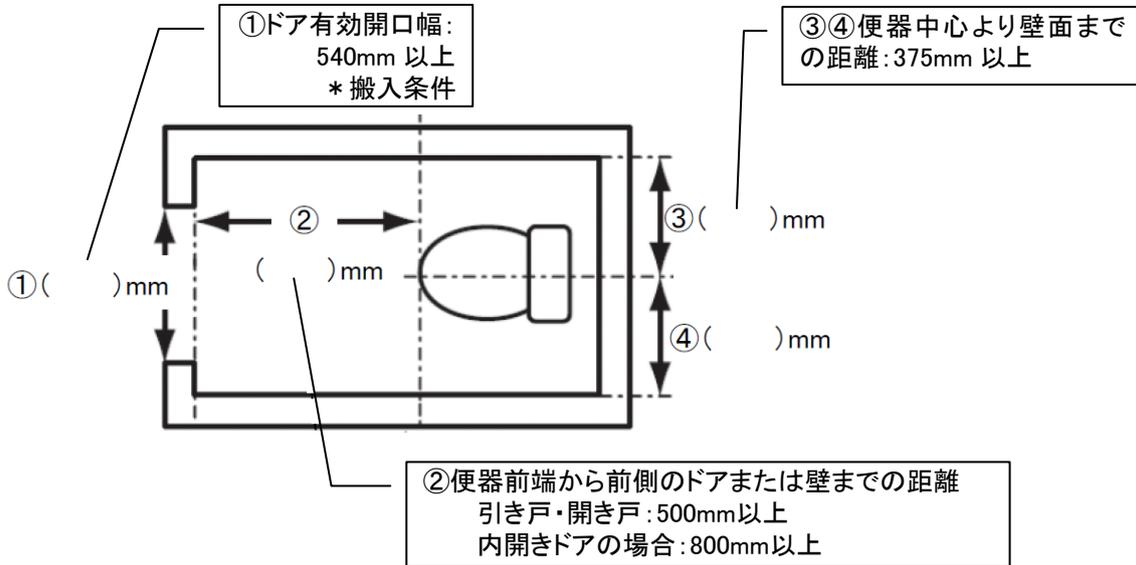


<B. 便器条件>

- *:レストパルなどキャビネット式便器には設置できません。
- *:ウォシュレット一体形便器には設置できません。
- *:タンク隅付型便器には設置できません。
- *:TOTO 製便器の場合、福祉機器設置可否検索にて品番別にご確認ください。
品番が不明な場合や他社製便器は下記にてご確認ください。

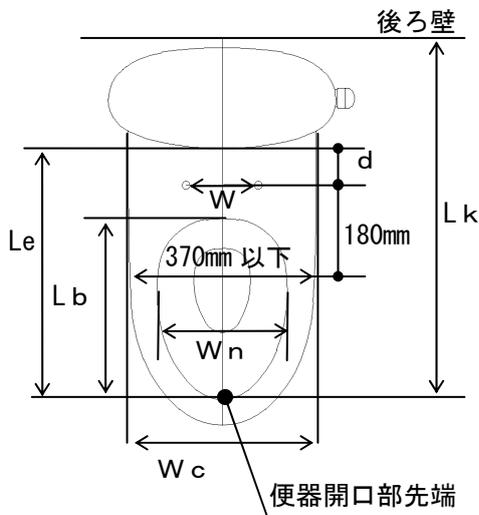


- Lk : 630 mm 以上
- Lb : 340mm 以上
- Le : 455mm 以上
- d : 50 mm 以上※1
- W : 140 mm
- Wn: 255 mm 以上
- Wc: 376 mm 以下※2

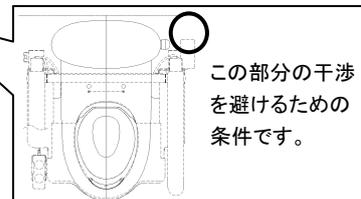

※1:レギュラーサイズ(普通サイズ)便器の場合、S・SB('15型~)、アプリコットF('12型~)は65mm以上。

※2:便座取付穴から180mmの位置の便器幅は370mm以下。

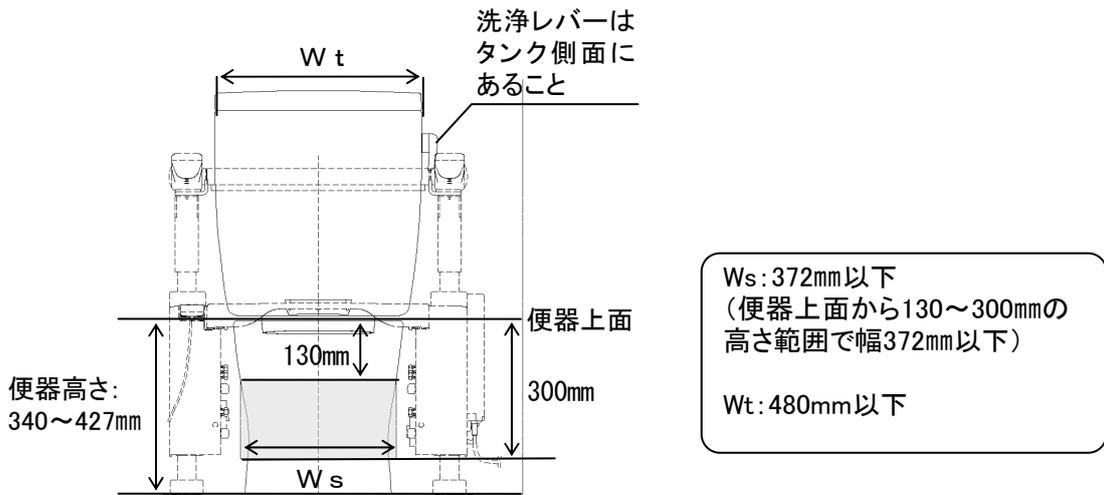


<C. 給排水条件>


- *: 給水の取り出し位置によってはウォシュレットの給水ホースの長さが不足する場合があります。不足する場合はウォシュレットの説明書を参考に適切な長さのホースをご購入ください。
- *: 右給水の場合は 2m のホースをご購入ください。

<トイレリフトが利用可能な給水取り出し範囲>


●床給水の場合

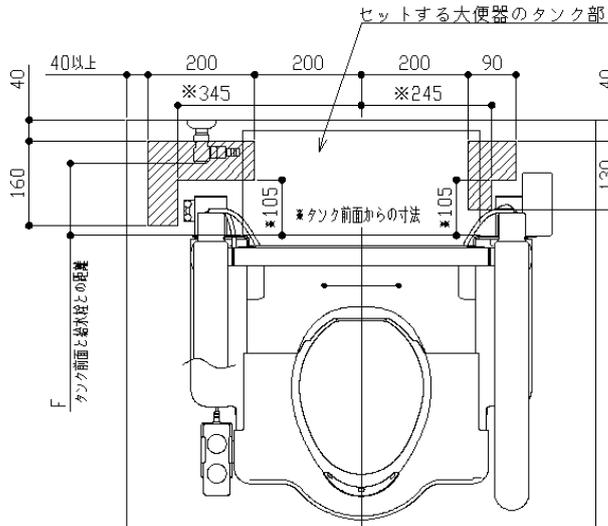

●壁給水の場合

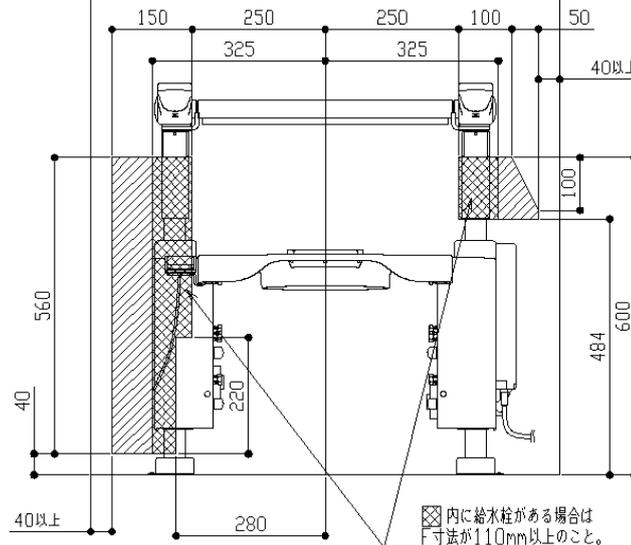

●横引き配管の場合

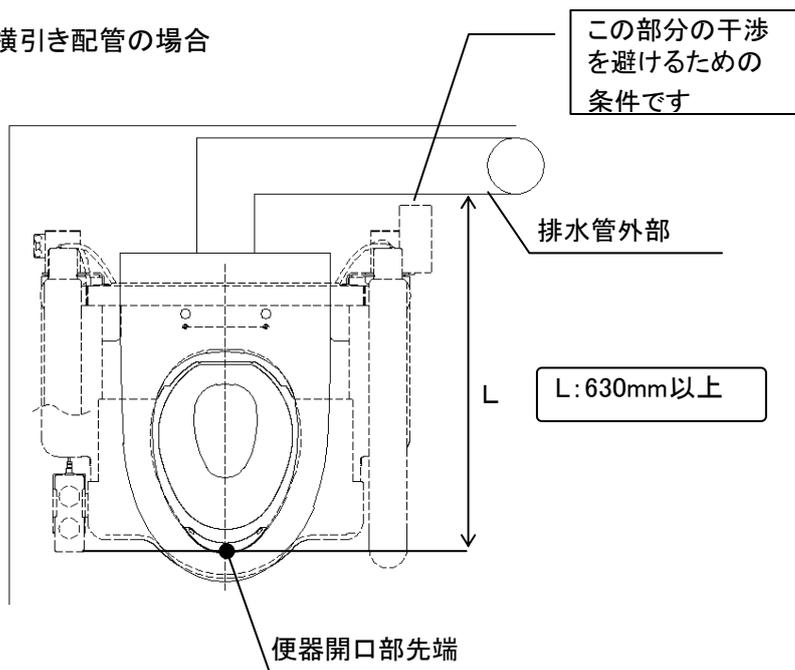

<D. 壁面条件(紙巻器・手すり等)>

* : 壁や紙巻器などの器具とアームレスト横のすき間は「50mm以上」あけてください。

すき間が狭いと、アームレストをはね上げたときに手などを挟んでけがをする原因になります。

※すき間が50mm以上確保できない場合は、紙巻器などの器具をアームレストの可動範囲からずらして設置しなおしてください。

